

Analizador Portátil de Lactato

# Lactate Pro™ 2

LT-1730



## Fácil y Rápido

Sólo 0.3 ml de sangre

Resultado en sólo 15 seg.

No necesita código chip

## Flexibilidad

Hasta 3 usuarios pueden guardar sus resultados

Analizador Portátil de Lactato

# Lactate Pro™ 2

## LT-1730



### Volumen Pequeño de muestra: 0.3 µl

Sólo 0,3 ml de muestra se necesita para la medición  
El volumen más pequeño en el mundo

### Medición Rápida: 15 seg.

El Resultado se muestra en sólo 15 segundos.

### No Chip de codificación

Sin problemas de funcionamiento antes de la medición gracias a la calibración automática

### Compacto - Ligero y práctico

Analizador Portátil ideal para usar en diferentes lugares  
Dimensiones 100 (L) x 50 ( ) x 12 (H) mm  
El peso es de sólo 45g (Incluyendo batería)

### Identificación de usuario

Hasta 3 usuarios pueden guardar individualmente sus resultados hasta 330 medidas en total

### Conexión a PC

Los resultados de medición se pueden transferir al ordenador con el nuevo software de Arkray



Volumen Muestra

- 0.3µL
- 1.0µL
- 5.0µL



Tiras Reactivas para Lactate Pro2.

Las tiras vienen en envases individuales



Resultados son transferidos al ordenador con el software de Arkray

## Measurement flow



Inserte una tira



Obtener muestra



Aspirar una gota de sangre para iniciar la medida



Aparecerá la concentración de lactato en la pantalla

### Specification

Muestra	Sangre	Capacidad de memoria	330 resultados
Reactivos	Tiras reactivas lactate Pro2	Salida externa	Yes (optional USB cable available)
Parametros de medición	Lactato en sangre	Condiciones de trabajo	Temperature: 5-40° C (41-104° F) Humidity: 20-80% RH (non-condensing)
Principio de medida	Electrodo con enzima lactato oxidasa	Dimensiones	100 x 50 x 12 mm
Rango de medida	0.5~ 25.0 mmol/L	Peso	45 g (con batería)
Tiempo de medida	15 seg. por test	Fuente de alimentación	3V Batería de Litio (CR2032 x 1pc)
Volumen de muestra	0.3 µL		
Pantalla	LCD		

✱ El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

arkray global business, inc.

KYOTO MIYUKI Bldg. 10F, 689 Takanna-cho,  
Nakagyo-ku, Kyoto 604-8153, JAPAN

TEL +81-75-662-8967 FAX +81-75-662-8973



# Laktate

www.laktate.com